


# 「マスク・メジャーリーガー」の正しい装着手順



マスク周辺からエア漏れが最小限になるように設計されている当モデルの特長を生かすため、次の装着手順をおすすめします。

**1** マスクの表と裏（顔面側）を確認します。  
**MAJOR LEAGUER** の刻印が正しく読める側が表です。

**2** マスクの上下を確認します。  
ノーズワイヤが埋め込んでいるのが上です。

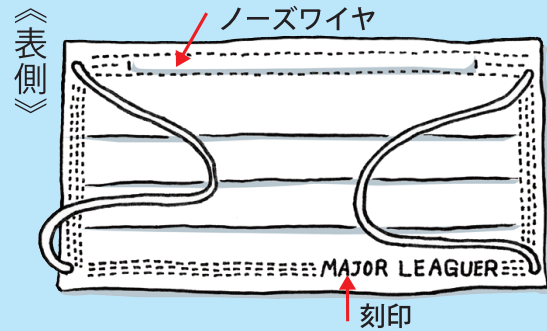

**3** まず、鼻にあたるノーズワイヤの中央部分を両手の指で凸型に曲げます。



**4** ③で作った凹面を鼻に押しあて、鼻の形に合わせるようにノーズワイヤを曲げます。



**5** 鼻から一度マスクを外し、凹面をより深く折り曲げます。



マスクを掛けます。そして、鼻の位置のノーズワイヤ部分を片手でしっかり押しつけながら、もういっぽうの手でマスクの下部を引っ張ってアゴをカバーします。（カバーを深くしすぎると、マスクのプリーツ（水平方向のひだ）が伸びすぎ、マスクと唇の間がなくなりますので、ご注意ください）



最後に、軽く口を開いて呼吸して息がマスクの上下左右から漏れないかを確認します。漏れを感じなくなるまで、マスク本体を上下左右に細かく動かして微調整します。漏れがほとんど感じない位置を見つけて、完了となります。

