


# 微粒子レスピレータ『PM-HY8220』の正しい装着方法

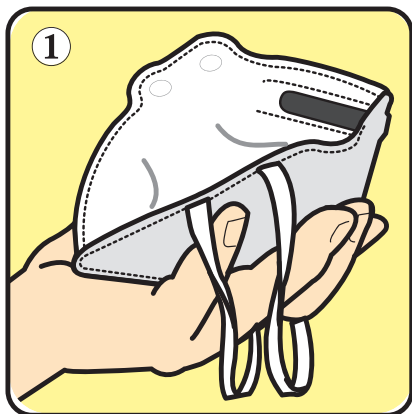

①鼻あて（ノーズワイヤ）を指先のほうにして、ゴムひもが下に垂れるように持ちます。



②鼻あてを上にして、微粒子レスピレータで顎を包むようにかぶせます。



③上側のゴムひもを頭頂部近くにつけます。



④下側のゴムひもを首の後ろ側につけます。



⑤指先で押さえつけるようにして鼻あて（ノーズワイヤ）を鼻の形に合わせて顔に密着させます。



⑥微粒子レスピレータと顔の隙間からの空気漏れの有無を調べ、正しく着用できているか確認します。

【⑥の確認方法】まず陽圧の確認は、微粒子レスピレータの表面を手で覆い「ゆっくり、強く」息を吐きます。その際に空気漏れを感じられたら、マスクの位置を修正します。

陰圧の確認は同様に、手でマスクを覆い「ゆっくり、強く」息を吸い込み、マスクが顔に向かって引きつけられれば陰圧の確認は終了です。

【陽圧】物体の内部の圧力が外部より高い状態。 【陰圧】物体の内部の圧力が外部より低い状態。


## 微粒子レスピレータ『PM-HY8220』の外し方



①マスクの表面には触らないように、最初は首の後ろのゴムひもから外します。



②続いて頭頂部のゴムひもを外します。

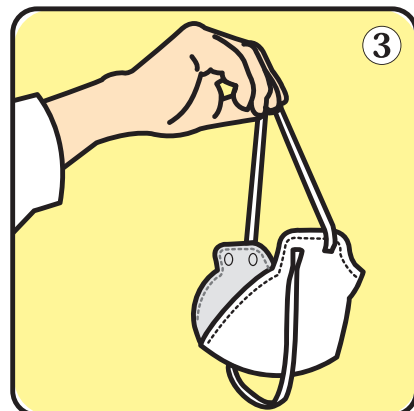

③マスクの表面には触らないように廃棄します。